

INSTRUKCJA UŻYWANIA
PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA DO SIEDZENIA

MODELE		
Nr katalogowy	BioFlote™ 2 Plus	BioFlote™ 2 Plus
Kod modelu	BioFlote™ 2 Plus/40	BioFlote™ 2 Plus/45
Wymiary	40 cm x 40 cm x 7 cm	45 cm x 40 cm x 7 cm
Max. bezpieczne obciążenie:	210 kg	210 kg



UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z poduszki należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

PRZEZNACZENIE


Poduszka przeciwodleżynowa do siedzenia BioFlote™ 2 Plus chroni użytkownika przed powstawaniem odleżyn i deformacją tkanki. Poduszka dopasowuje się do indywidualnych kształtów użytkownika. Poduszka przeznaczona jest dla użytkowników wózków inwalidzkich, osób długotrwale przebywających w pozycji siedzącej, z ryzykiem powstawania odleżyn, wymagających profilaktyki pochylenia miednicy.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Należy zadbać o to, aby poduszka leżała na pewnym podparciu.
- Nie należy dopuszczać do kontaktu poduszki z ostrymi przedmiotami mogącymi naruszyć jej powłokę.
- Poduszkę należy wypełnić odpowiednio dobraną ilością powietrza do wagi pacjenta, tak aby stabilizowała pozycję pacjenta i nie dopuszczała do kontaktu miednicy z podłożem, a jednocześnie nie wywierała zbyt dużego nacisku na ciało.
- Poduszkę należy trzymać z dala od źródła ognia i gorąca.
- Poduszki nie należy wyginać jeżeli jest napełniona powietrzem.
- Poduszkę należy przechowywać w suchym środowisku. Poduszka nie może być narażona na długotrwały kontakt z wilgocią.
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

SPOSÓB UŻYCIA

- Wyjmij poduszkę z opakowania, połóż na siedzisku i odkręć wentyl (rys. 1).
- Naciśnij silikonową złączkę pompki na wentyl i napompuj poduszkę odpowiednio do wagi pacjenta. Poduszka powinna być napompowana tak, aby nie wywierała zbyt dużego nacisku na ciało pacjenta i jednocześnie nie dopuszczała do kontaktu miednicy z twardym podłożem (rys. 2).
- Zakręć wentyl. Załóż na poduszkę pokrowiec tak, aby suwak był po przeciwległej stronie wentylu, a perforowana mata antypoślizgowa od strony podłoża (rys. 3).
- Położ poduszkę na siedzisku wentylem w stronę oparcia i posadź na nią pacjenta (rys. 4).
- Włóż rękę pomiędzy poduszkę i kość kulszową sprawdzając, czy ciśnienie w poduszce nie jest zbyt wysokie lub za niskie (rys. 5).
- W razie potrzeby skoryguj ciśnienie w poduszce (rys. 6).
- Aby spuścić powietrze z poduszki należy odkręcić zawór odprowadzenia powietrza.

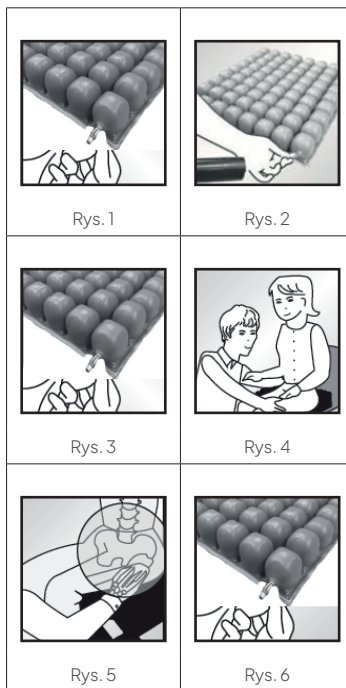

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Poduszka

1. Myj poduszkę wodą i neutralnym detergentem.
2. Wycieraj poduszkę wilgotną szmatką i zimną wodą.
3. Susz poduszkę powietrzem.
4. Nie wolno używać innego detergentu niż naturalny.
5. Nie pierz poduszki w pralce.
6. Nie stosować autoklawów.
7. Trzymać poduszkę z dala od promieni słonecznych.
8. Nie wkładać zaworu do wody.
9. Przechowywać poduszkę w suchym miejscu.

Pokrowiec

1. Prać w pralce zimną wodą z proszkiem do prania lub płynem do prania.
2. Spłucz zimną wodą i wysusz na powietrzu.
3. Nie używaj suszarki, grzejnika ani wybielacza.
4. Nie prasować.
5. Prać max. 20 razy.



UWAGA! Pokrowiec powinien być używany tylko przez jedną osobę. Pokrowiec należy wymieniać regularnie.

NAPRAWA

Do poduszki dołączony jest zestaw naprawczy. Aby naprawić miejsce naruszenia powierzchni poduszki postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

1. Upewnij się, że poduszka jest napompowana.
2. Włóż poduszkę pod wodę, aby zlokalizować miejsce przecieku powietrza.
3. Zaznacz miejsce przecieku.
4. Wytrzyj poduszkę i usuń z niej powietrze.
5. Wyczyść i wysusz dokładnie miejsce przecieku.
6. Przetrzyj delikatnie dołączonym papierem obszar wielkości łaty wokół miejsca przecieku.
7. Nanieś cienką warstwę kleju na obie sklepane powierzchnie (poduszkę i łatę), przyklej ją tak, aby przeciek znalazł się na jej środku i dociśnij na ok. 30 minut do momentu złapania kleju.
8. Odstaw poduszkę na co najmniej 2 godziny, aby klej mógł swobodnie wyschnąć.
9. Przygotuj poduszkę do użycia zgodnie z instrukcją sposobu użycia.



UWAGA! Dołączonego zestawu naprawczego można użyć dopiero po upłynięciu okresu gwarancyjnego.

Naprawianie poduszki samodzielnie bez zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego serwisu powoduje natychmiastową utratę praw gwarancyjnych.























LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Pokrowiec	poliester
Poduszka	polichloropren

GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości. Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta www.rehafund.pl).

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent		Recykling
	Oznakowanie CE		Nie przecinać
	Numer katalogowy		Przechowywać z dala od światła słonecznego
	Numer modelu		Góra, nie przewracać
	Wyrób medyczny		Chronić przed wilgocią
	Data produkcji		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Zajrzyj do instrukcji używania		Nie wybielać
	Ostrzeżenie		Nie prasować
	Kod partii		Nie czyścić chemicznie
	Ilość		Nie suszyć w suszarce
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		Suszyć w pozycji poziomej