

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PODUSZKA
PRZECIWOLEŻYNOWA DO SIEDZENIA**

| MODELE | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Nr katalogowy | BioFlote™ 3 Plus | BioFlote™ 3 Plus |
| Kod modelu | BioFlote™ 3 Plus/43 | BioFlote™ 3 Plus/45,5 |
| Wymiary | 40,5 cm x 43 cm x 7,5 cm | 40,5 cm x 45,5 cm x 7,5 cm |
| Max. bezpieczne obciążenie | 130 kg | 130 kg |



UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z poduszki należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Poduszka przeciwoleżynowa do siedzenia BioFlote™ 3 Plus przeznaczona jest do profilaktyki przeciwoleżynowej dla osób długotrwale przebywających w pozycji siedzącej.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Należy zadbać o to, aby poduszka leżała na pewnym podparciu.
2. Nie należy dopuszczać do kontaktu poduszki z ostrymi przedmiotami mogącymi naruszyć jej powłokę.
3. Poduszkę należy wypełnić odpowiednio dobraną ilością powietrza do wagi pacjenta, tak aby stabilizowała pozycję pacjenta i nie dopuszczała do kontaktu miednicy z podłożem, a jednocześnie nie wywierała zbyt dużego nacisku na ciało.
4. Poduszkę należy trzymać z dala od źródła ognia i gorąca.
5. Poduszki nie należy wyginać jeżeli jest napelniona powietrzem.
6. Poduszkę należy przechowywać w suchym środowisku. Poduszka nie może być narażona na długotrwały kontakt z wilgocią.
7. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Usiądź na poduszce.
2. Odkręć pokrętło do regulacji siły nacisku (rys.1).
3. Ustaw odpowiednią siłę nacisku zmniejszając lub zwiększając ilość powietrza znajdującego się w środku. Poduszka pompuje się samoczynnie.
4. Zakręć pokrętło.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**Poduszka**

Uważaj, aby zawór był zawsze zamknięty przed czyszczeniem!

Do mycia poduszki użyj mydła bakteriobójczego.


Użyj myjki, aby wytrzeć poduszkę do sucha.


Nie używaj detergentów ani innych rozpuszczalników.

Nie prać w pralce ani nie suszyć w suszarce.

Nie ogrzewać ani nie sterylizować w autoklawie parowym. Suszyć w temperaturze otoczenia.

rys. 1

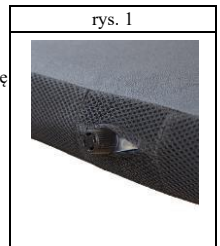


 **UWAGA!** Do suszenia poduszki nie wolno używać żadnych urządzeń grzewczych jak np. suszarka czy kaloryfer. Poduszki nie można prać w pralce ani suszyć w suszarce. Poduszki nie można sterylizować w autoklawie.

Pokrowiec

Prać w 30°C. Nie prasować.













Suszyć w temperaturze pokojowej lub w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze

 **UWAGA!** Pokrowca nie można suszyć w suszarce. Pokrowiec powinien być używany tylko przez jedną osobę.

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

| | |
|-----------|--|
| Pokrowiec | 100% poliester |
| Poduszka | Warstwa wewnętrzna: 100% pianka poliuretanowa Warstwa zewnętrzna górna: 50% TPU (termoplastyczny poliuretan) + 50% włókno poliestrowe Warstwa zewnętrzna dolna: 50% TPU (termoplastyczny poliuretan) + 50% włókno poliestrowe antypoślizgowe |

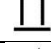WYJAŚNIENIE SYMBOLI

| | |
|---|------------------------------------|
|  | Producent |
|  | Oznakowanie CE |
|  | Numer referencyjny |
|  | Data produkcji |
|  | Zajrzyj do instrukcji używania |
|  | Ostrzeżenie |
|  | Numer serii |
|  | Góra, nie przewracać |
|  | Przechowywać w suchym miejscu |
|  | Delikatne, obchodzić się ostrożnie |
|  | Nie przecinać |
|  | Recykling |



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07

e-mail: info@rehafund.pl, www.rehafund.pl



Wer. 1.3

Wydano: 11/2022

NOTATKI

**KARTA GWARANCYJNA
PODUSZKA PRZECIWOŁEŻYNOWA DO SIEDZENIA**

| Model: | Numer seryjny: | Data sprzedaży: | Podpis i pieczęć sprzedawcy: |
|--------|----------------|-----------------|------------------------------|
| | | | |

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Siedzisko jest objęte 24 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że poduszka była wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją poduszki opisane w instrukcji użytkowania;
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia ławeczki np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
 - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH *(wypełnia serwis)*

| Lp. | Data zgłoszenia | Nr zlecenia | Opis wady/ Zakres naprawy | Data wykonania naprawy | Pieczęć i podpis serwisu |
|-----|-----------------|-------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |