

## INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

### PODUSZKI PRZECIWOODLEŻYNOWE - PNEUMATYCZNE

#### Modele:



**AR-093**  
PREVENT CLASSIC



**AR-094**  
PREVENT PLUS



**AR-095**  
PREVENT PREMIUM



**ARMEDICAL Sp. z o.o.**

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska

tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111

www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl



# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA PNEUMATYCZNA PREVENT

*Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu, cenimy sobie zaufanie, którym nas obdarzyliście. Dołożyliśmy wszelkich starań aby nasz wyrób spełniał Państwa oczekiwania, mamy nadzieję, że będzie pomocny i znacznie przyczyni się do poprawy Państwa zdrowia oraz komfortu. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.*

### **Zastosowanie:**

Poduszka przeciwodleżynowa przeznaczona jest dla osób z ryzykiem powstawania odleżyn, szczególnie osób przebywających długo w pozycji siedzącej np. na wózku inwalidzkim. Stosuje się ją w celu odciążenia części ciała, które podczas długotrwałego siedzenia osoby o ograniczonej zdolności ruchowej narażone są na stały ucisk, a w efekcie powstanie odleżyn. W szczególności służy do odciążenia kości ogonowej, miednicy oraz pośladków. Poduszka jednocześnie zmniejsza ucisk na krocze, oszczędzając bólu podczas siedzenia, zapewnia większy dopływ powietrza, wentylację ciała.

- zmniejsza ryzyko powstania odleżyn
- pomaga utrzymać prawidłowe krążenie krwi
- zapewnia właściwą cyrkulację powietrza
- poprawia komfort siedzenia

### **Właściwości produktu:**

Specjalna wielokomorowa konstrukcja oraz możliwość zmiany twardości poprzez dopompowanie lub upuszczenie powietrza gwarantują wysoki komfort użytkownika. Zastosowanie automatycznego zaworu (dot. AR-094, AR-095) umożliwia w dowolnej chwili zmianę twardości poduszki w zależności od preferencji użytkownika. Wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa odpornego na nacisk. Niezależne komory połączone są w jeden system powietrzny, dzięki czemu umożliwią balans ciała. Nacisk na wybraną komorę, powoduje wzrost ciśnienia w sąsiedniej komorze i tym samym odciążenie poszczególnych części ciała. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii zgrzewania poduszka nie rozszczelnia się. Poduszka wyposażona w przewiewny pokrowiec zapinany na suwak, wykonany z materiału siatkowego Mesh, z anty-poślizgowym spodem. Wygodny uchwyt umożliwia łatwe jej przenoszenie. Wyposażona ponadto w dodatkowe rzepy umożliwiające trwałe zamocowanie poduszki np. na wózku inwalidzkim.

### **Wymiary:**

AR-093 – rozmiar 42x42x4cm +/- 10mm po napompowaniu

AR-094 – rozmiar 46x38x4cm +/- 10mm po napompowaniu

AR-095 – rozmiar 44x41x6cm +/- 10mm po napompowaniu

**Maksymalne obciążenie: 120 kg**

### **Przygotowanie do użycia**

1. Wyjąć poduszkę z opakowania
2. W pierwszej kolejności należy poduszkę rozłożyć do właściwego jej kształtu (dot. AR-093) zgodnie ze zdjęciem na opakowaniu.
3. Otworzyć zawór i delikatnie wsunąć pompkę. Następnie należy napompować poduszkę do wymaganej twardości. Przekręcić zawór w lewo aby poduszka automatycznie napompowała się (dot. AR-094, AR-095)

### **⚠ Przeciwwskazania i zalecenia:**

Nie zaleca się stosowania poduszki w bezpośrednim kontakcie z ciałem. Nie należy stosować u osób z niestabilnością kręgosłupa, mających problem z pionizacją, otwartymi ranami, w trakcie doleczenia złamań jak również zaburzeniami błędniaka. Przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

Każdy **poważny** incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

**Utylizacja:** Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

**Zaprzestanie używania wyrobu:** W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

### **Uwagi i ostrzeżenia:**

Podczas pompowania należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić zaworu. Nie wolno pompować poduszki kompresorem mechanicznym, może dojść do uszkodzenia zaworu – nadmierne ciśnienie może doprowadzić do rozerwania poduszki. Zaleca się aby poduszka była pompowana dołączoną pompką (dot. AR-093) lub w sytuacjach wyjątkowych inną pompką ręczną, systematycznie kontrolując poziom twardości poduszki. Poduszki AR-094, AR-095 wyposażone w zawór automatyczny - nie wolno stosować żadnych pompek ręcznych, nożnych oraz kompresorów mechanicznych. Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta. Nie wolno wskakiwać na poduszkę (gwałtowny skok ciśnienia wewnątrz poduszki może doprowadzić do jej rozerwania).

### **W celu uniknięcia urazów:**

Nie wolno gwałtownie wskakiwać na poduszkę

Zabrania się stawać na poduszce nogami - grozi wypadkiem!

Zabrania się dopompowywać poduszkę w trakcie użytkowania

Zabrania się przekraczać maksymalne dopuszczalne obciążenie określone przez producenta

Stosować tylko i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem

### **Uwaga!**

Poduszka przeciwoleżynowa pneumatyczna szczególnie przeznaczona jest do użytkowania na wózkach inwalidzkich. Z uwagi na swoją funkcjonalność, może również być użytkowana przez osoby długo przebywające w pozycji siedzącej na fotelach, krzesłach, sofach itp..

Przed zastosowaniem poduszki na krzesłach, fotelach, sofach z jasnymi materiałami tapicerskimi należy dokonać próby, gdyż istnieje prawdopodobieństwo „odbicia” kropek z anty-poślizgowego spodu poduszki na jasnym materiale obiciowym. Użytkowanie poduszki na jasnych materiałach na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

### **Zakończenie użytkowania:**

Po zakończeniu użytkowania można wypuścić powietrze. Zawór należy otworzyć a następnie ścisnąć palcem wskazującym oraz kciukiem (dot. AR-093), przekręcić zawór w lewo, usiąść na poduszce i wypuścić powietrze (dot. AR-094, AR-095). Zawór pozostawić w pozycji otwartej. Poduszkę należy przechowywać w suchym miejscu z dala od ognia oraz ostrych przedmiotów. Nie przechowywać w miejscu nadmiernie nasłonecznionym (szczególnie napompowanej), wzrost temperatury powietrza w środku (a tym samym ciśnienia) może doprowadzić do jej rozerwania.

### **Sposób konserwacji:**

W razie potrzeby poduszkę myć ręcznie pod bieżącą, ciepłą wodą z użyciem łagodnych środków myjących np. mydła. Nie dopuścić do wiania się wody do wnętrza poduszki (zawór zamknięty). Nie stosować „agresywnych” detergentów, substancji żrących oraz oleistych. Mogą doprowadzić do uszkodzenia powłoki poduszki a tym samym jej rozszczelnienia. Nie wolno używać środków ściernych. Pokrowiec prać ręcznie lub w pralce (temp. max. 40 stopni C) przy zastosowaniu łagodnych, ogólnie dostępnych środków piorących.

Przed ponownym zastosowaniem poduszkę należy dokładnie osuszyć używając np.. ręcznika.

Wyprany pokrowiec należy dokładnie wysuszyć (nie stosować suszarek mechanicznych).

Przechowywanie zawilgoconej poduszki może prowadzić do zapleśnienia, nieprzyjemnego zapachu oraz utraty właściwości umożliwiających dalsze użytkowanie.

Przechowywanie w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności np. (piwnicy) w połączeniu z brakiem dokładnej konserwacji wyrobu (higieny) będą przyczyną utraty parametrów użytkowych i estetycznych a tym samym utraty gwarancji

Okres ważności: 5 lat.

**DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU**

# KARTA GWARANCYJNA:

Do karty należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu

<b>Data sprzedaży</b>	<b>Pieczęć i podpis sprzedawcy</b>
<b>Nr katalogowy</b>	
<b>Nr LOT</b>	

## SYMBOLE:



Wyrób  
medyczny

Zapoznaj  
się z  
instrukcją

Producent

Wyrób spełnia  
wymagania  
UE

Ostrzeżenie

Nr dato /  
serii

Data  
produkcji  
m-c/rok

Nadaje  
się do  
recyklingu

Selektywna  
zbiórka  
odpadów

1) Firma ARMEDICAL Sp. z o.o., 42-520 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 75, udziela niniejszym 12-miesięcznej gwarancji na produkt. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu produktu przez Użytkownika.

Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2) W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia produktu do prawidłowego funkcjonowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.

3) ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.

4) W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu lub wysłać na adres gwaranta.

5) Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych tj. np. rozdarcie, przecięcie lub przekłucie poduszki lub materiału pokrowca przy pomocy ostrego przedmiotu. Gwarancja nie są objęte uszkodzenia materiału pokrowca powstałe na skutek np. zaciągnięcia, „zmechacenia materiału” ostrymi elementami garderoby (tj. sprzączki, nity, suwaki, guziki). Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużywania się pokrowca w toku normalnej eksploatacji (tj. delikatnego „zmechacenia”, lekkiej utraty koloru spowodowanej praniem, tarciem ekspozycją na słońce).

6) Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania poduszki niezgodnie z jej przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi a także w przypadku przekroczenia przez użytkownika maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta.

7) Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Użytkownika lub inne osoby nieupoważnione napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w wyrobie.

8) Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną.

9) Reklamację należy zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego określającego rodzaj stwierdzonych wad wraz z okolicznościami ujawnienia się wady. W przypadku nie dochowania warunków zgłaszania reklamacji określonych w niniejszej instrukcji wyłącza odpowiedzialność gwaranta.